


So wenden Sie x-top richtig an:

1

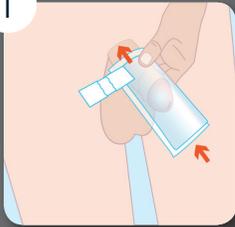

Schieben Sie x-top so weit wie möglich über den Penis.

2



Fixieren Sie x-top mit dem elastischen Klettverschluss so stramm, dass die Schutzhülle wirklich fest sitzt. Sie können den Sitz mehrfach nachjustieren.

3



Wichtig ist, dass die Schutzhülle nicht abrutschen kann und immer stramm sitzt.

Wechseln Sie Ihre x-top-Schutzhülle nach Bedarf, mindestens aber 1 x täglich. Benutzte Schutzhüllen entsorgen Sie umweltgerecht mit dem ganz normalen Haushaltsmüll.



Wichtig!



Tragen Sie keine Boxershorts, sondern enge Unterhosen.

Exklusiv bei:

all+care

Kundendienst & Beratung

1070 Puidoux
9000 St. Gallen

☎ Tel.: 058 255 12 33

📠 Fax: 058 255 12 32

✉ E-Mail: info@all4care.ch



10 Schutzhüllen pro Box



McAirlaid's Vliesstoffe GmbH
Münsterstraße 61-65, D-48565 Steinfurt

Stand: Mai 2019



x-top - das Inkontinenzprodukt für Männer

x-top



McAirlaid's  all+care

Die innovative Schutzhülle bei Blasenschwäche für Männer

x-top ist eine einzigartige Schutzhülle, die den Penis vollständig umschließt und durch das stark absorbierende Material und die ergonomische Form einen sicheren Rundum-Schutz bietet.

Durch den wiederverschließbaren Verschluss kann x-top so angepasst werden, dass kein Ver-rutschen oder Auslaufen möglich ist. Dadurch ist x-top diskret und bietet 100% Aus-laufschutz.

Dank der SuperCore Technologie wird Flüssig-keit schnell absorbiert und im Inneren einge-schlossen. Unangenehme Gerüche haben keine Chance!



wiederverschließbarer Verschluss
für einen sicheren Halt

hautfreundliches,
weiches Innenvlies

Urin wird dank SuperCore schnell
absorbiert und im Kerninneren
gebunden



atmungsaktives &
wasserdichtes Außenvlies

geruchsbindend

frei von Latex, Klebe- und Bindemittel



Was ist SuperCore?

Durch die SuperCore Technologie kann x-top große Mengen an Flüssigkeit aufnehmen und im Kerninneren binden.

Das Besondere an diesem Verfahren ist die Absorption der Flüssigkeit entgegen der Schwerkraft: der Urin wird nach oben transportiert und verteilt sich somit gleichmäßig in der Schutzhülle.

Vorteile von x-top

- ✓ 100% Auslaufschutz
- ✓ Saugstarker SuperCore Saugkern
- ✓ Starke Absorption
- ✓ Geruchsbindend
- ✓ Dünn und diskret
- ✓ Erhältlich in drei Level