


Comment utiliser correctement x-top :

1

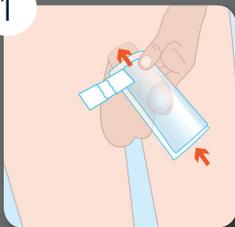

Enfilez x-top aussi loin que possible sur le pénis.

2



Fixez x-top avec le velcro élastique de manière à ce que la gaine de protection soit très serrée. Vous pouvez la réajuster plusieurs fois.

3



Il est important que la gaine de protection ne puisse pas glisser et qu'elle soit toujours bien ajustée.

Changez votre gaine de protection x-top au besoin, mais au moins une fois par jour.

Les gaines de protection usagées doivent être jetées dans le respect de l'environnement avec les ordures ménagères.



Important!



Ne portez pas de caleçons, mais des slips serrés.

Exclusivement chez:

all4care

Service à la clientèle et conseils

1070 Puidoux
9000 St. Gall

Tél.: 058 255 12 33

Fax: 058 255 12 32

E-Mail: info@all4care.ch



10 gaines de protection par emballage



McAirlaid's Vliesstoffe GmbH
Münsterstraße 61-65, D-48565 Steinfurt

État mai 2019



x-top – Pour l'incontinence de l'homme

x-top



McAirlaid's  all4care

La gaine de protection innovante contre l'incontinence chez l'homme

x-top est une gaine de protection unique qui enveloppe complètement le pénis et qui offre une protection complète et sûre grâce à son matériau hautement absorbant et sa forme ergonomique.

La fermeture velcro permet d'ajuster la gaine x-top pour éviter tout glissement ou fuite. Ainsi, x-top est discret et offre une protection à 100% contre les fuites.

Grâce à la technologie SuperCore, le liquide est absorbé rapidement de manière optimale et enfermé à l'intérieur. Les odeurs désagréables n'ont aucune chance!



Fermeture velcro pour un maintien sûr

Revêtement intérieur doux et hypoallergénique

Grâce à SuperCore, l'urine est rapidement absorbée



Couche extérieure respirante et imperméable

Fixateur d'odeurs

Sans latex, adhésifs et liants



Qu'est-ce que SuperCore ?

Grâce à la technologie SuperCore, x-top peut absorber d'importantes quantités de liquide.

La particularité de ce procédé est l'absorption du liquide grâce à l'effet capillaire : l'urine est aspirée vers le haut et ainsi répartie uniformément dans la gaine de protection.

Avantages de x-top:

- ✓ 100% de protection contre les fuites
- ✓ Technologie d'aspiration SuperCore
- ✓ Puissante absorption
- ✓ Fixateur d'odeurs
- ✓ Mince et discret
- ✓ Disponible en trois classes